



out now! AS UNIQUE AS YOU

www.mysize-condoms.com

Vielleicht mehr als du erwartest.

Alles, was Kondom kann:

Leicht zu öffnen, angenehmer Duft, 9 Breiten, extra dünn. Allergenarmer, **vytex** Latex. Vegan, für Mensch und Umwelt fair produziert. Maximale Gefühlsechtheit und Sicherheit.

Das Kondom, das du vergisst, weil du es trägst.



HINWEIS: Für eine erste Breitenempfehlung von **MY.SIZE IP R O** ist der Penisumfang entscheidend - nicht die Penislänge.

WICHTIG: Über die verschiedenen Breiten spielst du mit deinem Empfinden. Wichtig ist, dass das Kondom nicht abrutscht oder zu eng ist.



WICHTIGE INFO:

Beim Drucken Seitenanpassung „KEINE“ auswählen. Das Maßband wird sonst nicht maßstabsgetreu ausgedruckt. Am besten die Datei herunterladen und mit Adobe-Acrobat OHNE Seitenanpassung drucken.

Verbreite Dein Glück mit **MY.SIZE IP R O**: trenne den oberen Streifen für einen Freund ab.

Schritt für Schritt. So einfach geht es.



01. Trenne das **MY.SIZE IP R O** - Maßband an der gestrichelten Linie entlang ab.




02. Lege das Maßband vorsichtig an der breitesten Stelle um den erigierten Penis. Die empfohlene Breite kannst du am Pfeil ablesen.

ACHTUNG: Beim Heraustrennen können scharfe Papierkanten entstehen!



03. Du hast jetzt eine erste Empfehlung - spiele mit den Größen um diese Breite:

Jetzt kommt es auf dein Empfinden - und auf deine Vorlieben an.

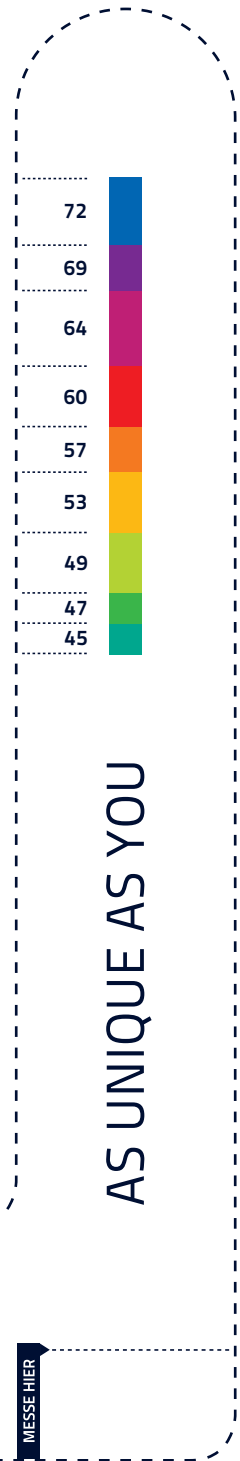

MESSE HIER