



**NU VERKRIJGBAAR!**

**ZO UNIEK ALS JIJ**

[www.mysize-condoms.com](http://www.mysize-condoms.com)

## Misschien meer dan je verwacht!

Alles wat je van een condoom verwacht:

Makkelijk te openen, aangename geur, 9 breedtes, extra dun. Allergeenarme vytex latex, vegan, geproduceerd met respect voor mens en milieu. Maximaal natuurlijk gevoel en veilig.

Het condoom dat je vergeet, terwijl je het draagt.



**OPMERKING:** voor een eerste breedte-advies van **MY.SIZE IPRO** is de penisomtrek bepalend - niet de penislengte.

**BELANGRIJK:** ga bij de verschillende breedtes op je gevoel af. Het is belangrijk dat het condoom niet afglijdt of te strak zit.



### **BELANGRIJKE INFO:**

Selecteer bij het printen „GEEN” voor aanpassen pagina. Anders wordt het meetlint niet op schaal weergegeven. Het bestand downloaden en afdrucken met Adobe-Acrobat ZONDER de pagina aan te passen.

Gun ook anderen **MY.SIZE IPRO**: knip de bovenste strook af voor een vriend.

## Stap voor stap. Zo gemakkelijk gaat het.

**01.** Knip het **MY.SIZE IPRO** -meetlint langs de stippellijn af.




**02.** Plaats het meetlint voorzichtig om het breedste deel van de penis in erectie. Je kunt de aanbevolen breedte aflezen bij de pijl.

LET OP: Bij het uitknippen kunnen scherpe papierranden ontstaan.



**03.** Je hebt nu een eerste advies - probeer ook de maten rond deze breedte uit.

Nu hangt het af van hoe het voelt - en wat je voorkeuren zijn.

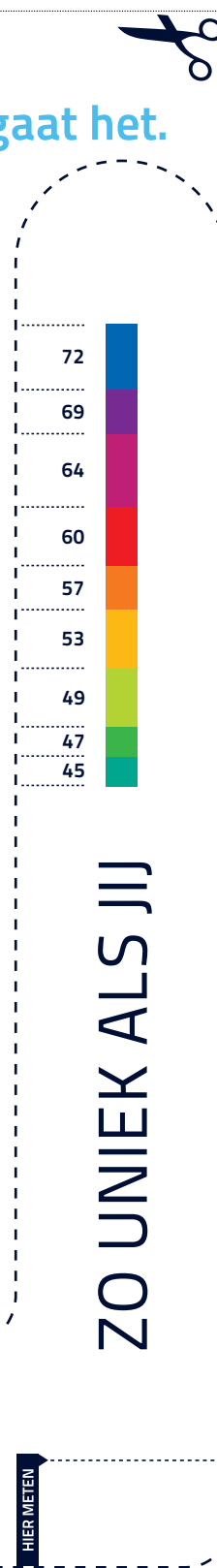

HIER METEN